

Informazioni sul kit

-  Dispositivo medico in vitro
-  Produttore
-  Conformità Europea
-  Data di scadenza
-  Contiene 1 Kit
-  Conservare a una temperatura tra 2°C e 30 °C
-  Non riutilizzabile
-  Numero Articolo
-  Riciclo
-  Istruzione per l'uso
-  Materiale carta

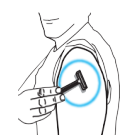
Lab Evo S.r.l.
Via Francesco Caracciolo, 26
20154 Milano Italia

 Raccolta differenziata.
Verifica le disposizioni
del tuo comune.

Istruzioni d'uso kit device da braccio

- 

1. Accedere al sito www.lab-evo.com, selezionare «attiva il kit», compilare i campi indicati e seguire le istruzioni.
- 

2. Lavare le mani sotto acqua corrente.
- 

3. Il dispositivo andrà posizionato nella parte alta del braccio. Per un risultato ottimale rimuovere i peli superflui.
- 

4. Rimuovere il device dalla confezione.
- 

5. Rimuovere il tappo dalla provetta.
- 

6. Inserire la provetta nel dispositivo con l'indicazione dei volumi rivolti verso l'esterno.

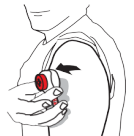
- 

7. Pulire la zona con l'alcool pad in dotazione. Sfregare per qualche minuto con movimenti circolari per scaldare la zona.
- 

8. Rimuovere la protezione trasparente dal bottone rosso.
- 

9. Rimuovere la pellicola sul retro del device e applicarlo fermemente sulla parte superiore del braccio. Tenere il braccio lungo il fianco.
- 

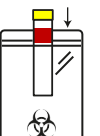
10. Premere il bottone rosso. Il sangue inizierà a scendere dopo 1-2 minuti. Da quando scende la prima goccia, tenere su il device per 5 minuti.
- 

11. Interrompere l'operazione solo una volta che la provetta avrà raggiunto una capienza superiore ai 600ul. Se inferiore il campione non sarà analizzato.
- 

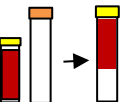
12. Rimuovere il device dal braccio staccandolo da un lato. Se necessario applicare un cerotto sulla zona interessata.

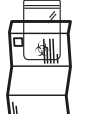
- 

13. Rimuovere la provetta dal device con una leggera rotazione.
- 

15. Ruotare la provetta per 10 volte.
- 

17. Segnarsi il numero (barcode) riportato sulla provetta, che servirà per attivare il test. Inserire la provetta nella biohazard bag.
- 

14. Chiudere la provetta spingendo il tappo nell'apertura fino a quando non si percepisce uno scatto.
- 

16. Inserire la provetta con il sangue all'interno della seconda provetta con il barcode.
- 

18. Inserire la Biohazard bag contenente la provetta con il sangue nella scatola Lab Evo. Inserire la scatola nella busta per la spedizione.

Avvertenze

- Non utilizzare il kit se si soffre di una malattia contagiosa a trasmissione ematica quale l'HIV.
- Conservare il kit lontano dalla portata dei bambini.
- Il kit può essere utilizzato esclusivamente da adulti con età dai 18 anni in su.
- Se si è incinta o si allatta, utilizzare il kit solo dopo aver consultato il proprio medico.
- Se soffre di un difetto congenito o di un disturbo acquisito della coagulazione o se sta assumendo anticoagulanti, utilizzare il kit solo dopo aver consultato il proprio medico.
- Utilizzare il device o le lancette solo come descritto nelle istruzioni per l'uso.
- In caso di problemi con la vista del sangue o con il prelievo, prelevare il campione solo in presenza di un'altra persona o contattare il proprio medico o farmacista.
- Non prelevare immediatamente il campione di sangue dopo una strenua attività fisica.
- In caso di difficoltà nel prelevare il campione di sangue o se il kit è incompleto, contattare il nostro servizio clienti che si occuperà del problema in modo confidenziale (www.lab-evo.com).
- Inserire le componenti usate del kit per il test nel sacchetto di plastica e gettarle nei rifiuti domestici.
- **Questo kit per prelevare campioni di sangue non è riutilizzabile!**

Per qualsiasi domanda, inviare un'e-mail all'indirizzo support@lab-evo.com o visitare la pagina di assistenza del nostro sito web all'indirizzo www.lab-evo.com.



PIEGHEVOLE INFORMATIVO

ANALISI DI LABORATORIO
DA PRELIEVO DI SANGUE CAPILLARE

-  Comodità
-  Facilità
-  Affidabilità
-  Rapidità

Live better live longer