



Informazioni sul kit

-  Dispositivo medico in vitro
-  Produttore
-  Conformità europea
-  Data di scadenza
-  Contiene 1 kit
-  Materiale carta
-  Esclusivamente monouso
-  Numero articolo
-  Riciclo
-  Istruzione per l'uso
-  Conservare a una temperatura tra 2°C e 30°C

 **Lab Evo S.r.l.**
Via Francesco Caracciolo 26
20154 Milano Italia

 Raccolta differenziata.
Verifica le disposizioni
del tuo comune.

Istruzioni d'uso kit feci

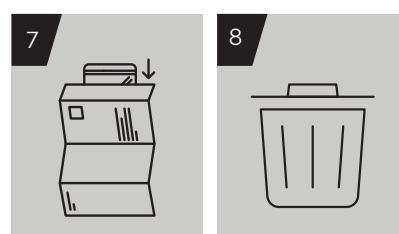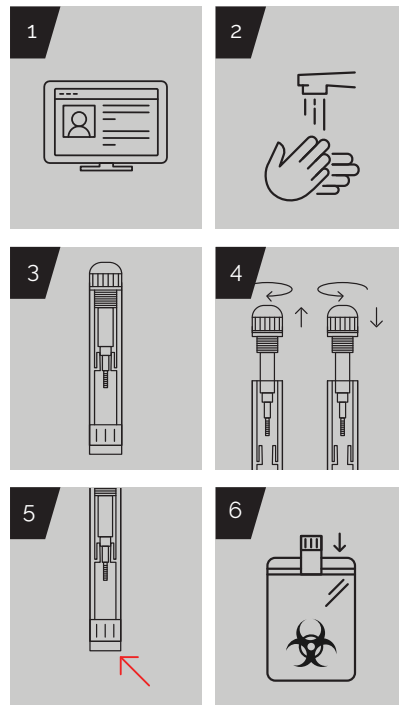

- 1 Accedere al sito **web www.lab-evo.com**, selezionare «Attiva il kit», compilare i campi indicati e seguire le istruzioni.
- 2 Lavare le mani sotto acqua corrente.
- 3 La provetta per l'analisi del sangue occulto nelle feci (FOB) viene consegnata con il campionatore immerso in una soluzione che ne garantisce la stabilità.
- 4 Raccolta del campione. Il campionatore è di facile utilizzo, basta svitare il tappo verde e prelevare un campione. Il tubo si chiude ermeticamente per garantire la stabilità del campione fino a 7 giorni.
- 5 Assolutamente **non** svitare l'altro tappo, quello bianco.

- 6 Inserire la provetta con il campione di feci nella Biohazard bag per il trasporto. Segnarsi il numero riportato sulla provetta, che servirà per attivare il test! Sigillare con cura.
- 7 Inserire la Biohazard bag contenente la provetta con il campione di feci nella scatola Lab Evo. Inserire la scatola nella busta per la spedizione.
- 8 Inserire le componenti usate del kit per il test nel sacchetto di plastica e gettarle nei rifiuti domestici.

Avvertenze

Ogni provetta deve essere inserita in una Biohazard bag diversa.

Conservare il kit lontano dalla portata dei bambini.

Il kit può essere utilizzato esclusivamente da adulti con età dai 18 anni in su. Inserire le componenti usate del kit per il test nel sacchetto di plastica e gettarle nei rifiuti domestici.

Questo kit non è riutilizzabile

Per qualsiasi domanda, inviare un'e-mail all'indirizzo support@lab-evo.com o visitare la pagina di assistenza del nostro sito web all'indirizzo www.lab-evo.com.



PIEGHEVOLE INFORMATIVO

ISTRUZIONI PROVETTE ESAME URINE ED ESAME FECI



Comodità



Facilità






Affidabilità



Rapidità

live better, live longer

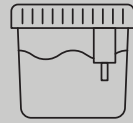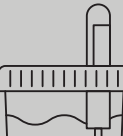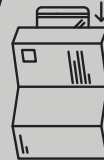Il kit esame urine contiene:	Informazioni importanti	Istruzioni d'uso kit urine			Avvertenze
1 Vasetto tondo 1 Provetta da 9 ml 1 Biohazard bag per il trasporto 1 Busta preaffrancata 1 Codice sulla provetta per attivazione KIT	- Il campione andrebbe prelevato tra il lunedì (e non oltre il giovedì) e inviato il giorno stesso. - Non spedire quando ci sono ponti o festività. - Prima di effettuare il prelievo, attivare il kit e prenotare il ritiro.	1  2  3  4  5  6 	7  8  9 	5 Capovolgere la provetta da 9 ml (tappo bianco) e inserirla nel foro presente sul coperchio del contenitore giallo, esercitando una leggera pressione verso il basso. 6 L'urina raccolta andrà automaticamente a riempire la provetta (NB: il mancato riempimento è da ricondursi raccolta di un volume d'urina scarso o alla non idonea chiusura del contenitore giallo). 7 Inserire la provetta con l'urina nella Biohazard bag per il trasporto. Segnarsi il numero riportato sulla provetta, che servirà per attivare il test! Sigillare con cura. 8 Inserire la Biohazard bag contenente la provetta con l'urina nella scatola Lab Evo. Inserire la scatola nella busta per la spedizione. 9 Inserire le componenti usate del kit per il test nel sacchetto di plastica e gettarle nei rifiuti domestici.	Ogni provetta deve essere inserita in una Biohazard bag diversa. Conservare il kit lontano dalla portata dei bambini. Il kit può essere utilizzato esclusivamente da adulti con età dai 18 anni in su. Inserire le componenti usate del kit per il test nel sacchetto di plastica e gettarle nei rifiuti domestici. Questo kit non è riutilizzabile Per qualsiasi domanda, inviare un'e-mail all'indirizzo support@lab-evo.com o visitare la pagina di assistenza del nostro sito web all'indirizzo www.lab-evo.com.
Il kit esame feci contiene:	Informazioni sul kit				
1 Provetta per l'analisi del sangue occulto 1 Biohazard bag per il trasporto 1 Busta preaffrancata 1 Codice sulla provetta per attivazione KIT	 Leggere le Istruzioni per l'uso attentamente prima di iniziare a seguire i passaggi indicati.				

PREPARAZIONE ALL'ESAME

RICERCA DI SANGUE OCCULTO NELLE FECI

Tipo di contenitore



Per effettuare questo esame utilizza il contenitore contenente il conservante, come quello mostrato in foto, che potrai **ritirare nel centro Santagostino dove consegnerai il campione.**

AIUTACI A LIMITARE GLI SPRECHI



Se pensi di non effettuare il test o di non usare tutti i contenitori, non ritirarli.

Se ne hai di non utilizzati, riportali: potranno essere riutilizzati da altri pazienti.

È un piccolo gesto, ma fa una grande differenza per l'ambiente e per gli altri pazienti!

Indicazioni generali



- Per svolgere questo esame **non serve osservare digiuno** prima della raccolta o seguire particolari preparazioni all'esame
- Effettua il prelievo **immediatamente dopo** la defecazione
- **Non** raccogliere le feci in caso di **diarrea**, se c'è **sanguinamento** del retto (es. emorroidi o altre cause), durante le **mestruazioni** o se contaminate con **urine**

Procedura di raccolta del campione




Nota: ricordati di **ritirare i contenitori che ti servono!**

1




Poni della **carta igienica** all'interno del sanitario
Cerca di defecare in corrispondenza della carta igienica: è più facile se **ti siedi al contrario**.

2

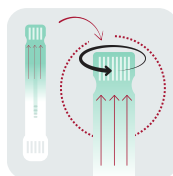

Svita il **tappo verde** del contenitore **dalla parte delle frecce**, tenendo il contenitore in verticale. **Non buttare il liquido** presente nel contenitore. **ATTENZIONE:** se apri il contenitore dalla parte sbagliata **si romperà** e se ne dovessi avere bisogno di altri dovrai pagarli.

3

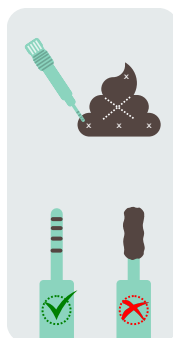

Inserisci la punta dello stick verde nelle feci in **4 punti diversi e striscia a croce** sulla superficie. Solo le **prime scanalature** dello stick devono essere ricoperte di feci.


ATTENZIONE: non raccogliere una quantità eccessiva di feci!
In caso di campione eccessivo sarà necessario **ripetere l'esame e comprare i contenitori**.

4



Rimuovi l'eventuale eccesso con un tovagliolo di carta, **senza lasciare residui** (i pezzi di carta invalidano il campione).

5

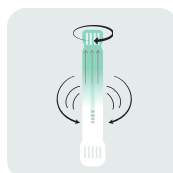

Reinserisci lo stick nel contenitore, **riavvita e agita lievemente**.
Controlla che non ci sia deposito eccessivo sul fondo del contenitore.

6



Pulisci l'esterno del contenitore e riponilo nella biohazard bag.